

- Přesnost vyšší než 99 % po dni očekávané menstruace.
- Před provedením testu si pozorně přečtěte tento příbalový leták.

1 Kdy testovat



- Test lze provádět již 6 dní před vynechanou menstruací, což je 5 dní před očekávanou menstruací.
- Jestliže provádíte test před očekávanou menstruací, použijte ranní moč. Jinak můžete test provést kdykoli během dne.
- Před provedením testu nepijte větší objem tekutin.

2 Proveďte test



PROUD MOČI
Indikátor správného použití musíte držet v proudu moči celých 5 sekund.

A

NEBO



ODEBRANÝ VZOREK
Jakmile indikátor správného použití zrůžoví, začnete odpočítávat 20 sekund. Zcela ponořte pouze indikátor.

B

- Odstraňte fóliový obal a sejměte kryt. Testovací tyčinku ihned použijte.

Zvolte si způsob testování

- **DŮLEŽITÉ:** Indikátor správného použití ihned zrůžoví, čímž ukazuje, že je moč absorbována.

A Držte indikátor správného použití v proudu moči celých 5 sekund.

NEBO


B Na celých 20 sekund zcela ponořte pouze indikátor do vzorku moči odebrané do čisté a suché nádoby.

- Jestliže indikátor správného použití nebude úplně růžový, viz otázka 7.
- Znovu nasadte kryt a položte testovací tyčinku na rovnou plochu.
- Začnete odpočítávat.



POČKEJTE CELÉ 3 MINUTY Před interpretací výsledku

3 Podívejte se na výsledek

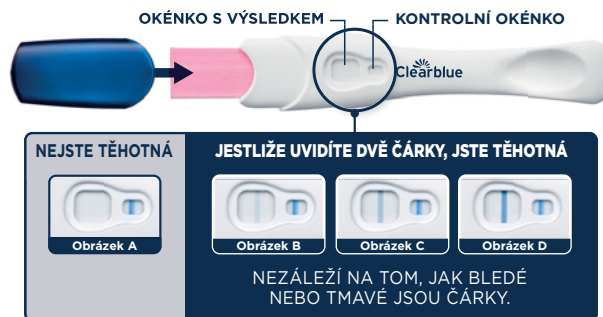

- Čárka v kontrolním okénku se může rychle objevit, ale **MŮSÍTE** počkat 3 minuty, než budete interpretovat výsledek. Jestliže v kontrolním okénku nevidíte modrou čárku, test neproběhl (viz otázka 8).
 - Jestliže je výsledek „**Nejste těhotná**“, viz otázka 4.
 - Jestliže je výsledek „**Jste těhotná**“, viz otázka 3.
 - Pokud si stále nejste jista výsledkem, viz otázka 9.
- DŮLEŽITÉ!** Výsledek si přečtěte během **10 minut** od provedení testu. Jakékoli změny ve výsledku po této době ignorujte.

Otázky a odpovědi

1 Jak funguje těhotenský test Clearblue?

Když jste těhotná, Vaše tělo produkuje těhotenský hormon hCG (lidský choriový gonadotropin). Tento test dokáže zjistit i malá množství hCG v moči (citlivost tohoto testu je 10 mIU/ml).

2 Kdy mohu provádět test Clearblue Ultra časný?

Test lze provádět již 6 dní před vynechanou menstruací, což je 5 dní před očekávanou menstruací. Pokud provádíte test před očekávanou menstruací a výsledek je „Nejste těhotná“, stále ještě existuje možnost, že těhotná jste. Viz níže uvedená tabulka s výsledky testování v laboratoři se vzorky z rané fáze těhotenství.

Počet dnů před očekávanou menstruací % vzorků	Časné testování					
	0	1	2	3	4	5
od těhotných žen s výsledkem „Jste těhotná“	>99 %	>99 %	>99 %	>99 %	96 %	79 %

3 Test říká „Jste těhotná“. Co mám udělat?

Měla byste navštívit svého lékaře, který Vám může poradit, jaké další kroky byste měla učinit.

4 Test říká „Nejste těhotná“, ale já si přesto myslím, že možná jsem. Co mám udělat?

Pravděpodobně nejste těhotná, nebo hladina hCG ještě není dostatečně vysoká, aby mohla být zjištěna, nebo jste možná špatně spočítala den očekávané menstruace. Pokud jste test provedla v časně fázi, proveďte jej znovu v době očekávané menstruace. Pokud je menstruace opožděna, proveďte test znovu za 3 dny. Pokud tento test udává výsledek „Nejste těhotná“ a stále ještě nemáte menstruaci, navštivte svého lékaře.

5 Měla jsem výsledek „Jste těhotná“, ale když jsem test zopakovala, byl výsledek „Nejste těhotná“ nebo jsem začala menstruuat. Co to znamená?

Test detekuje těhotenský hormon po dni očekávané menstruace s přesností vyšší než 99 %, lze tedy obdržet výsledek „Jste těhotná“ a později zjistit, že nejste těhotná (tj. později obdržíte výsledek „Nejste těhotná“ nebo začnete menstruuat). Může k tomu dojít v důsledku samovolných potratů v raných stádiích těhotenství, kterým se říká „časná těhotenská ztráta“ a které bohužel nejsou neobvyklé, protože asi každé čtvrté těhotenství je ukončeno jako časná těhotenská ztráta. Pokud obdržíte neočekávané výsledky, požádejte svého lékaře o radu.

6 Může být výsledek testu ovlivněn některými léky nebo zdravotním stavem?

Před provedením testu si vždy přečtěte pokyny od výrobce v příbalových letácích všech léků, které užíváte.

Léky obsahující hCG mohou ovlivnit výsledek testu. Mimoděložní těhotenství a nedávné těhotenství, i v případě nedonošení, mohou způsobit zavádějící výsledky. Pokud jste v menopauze nebo se jí blížíte, můžete obdržet falešně pozitivní výsledek „Jste těhotná“, ačkoli těhotná nejste. Test by neměl být ovlivněn hormonálními terapiemi obsahujícími klomifen citrát, léky proti bolesti, alkohol, antibiotika nebo antikoncepční pilulky. Pokud obdržíte neočekávané výsledky, obraťte se se svým lékařem.

7 Když jsem provedla test, indikátor správného použití nezrůžověl úplně. Co mám udělat?

Je možné, že jste neaplikovala dostatečné množství moči, ale pokud se do 10 minut po provedení testu objeví v kontrolním okénku modrá čárka, test proběhl. Jestliže se do 10 minut po provedení testu neobjeví v kontrolním okénku modrá čárka, viz otázka 8.

8 Provedla jsem test, ale v kontrolním okénku se neobjevila modrá čárka. Co mám udělat?

Pokud uplynulo více než 10 minut od doby, kdy jste provedla test, pak test neproběhl. Možná příčina:

- Po aplikaci moči nebyl indikátor správného použití udržován v takové poloze, aby směřoval dolů, nebo testovací tyčinka nebyla položena na rovnou plochu.
 - Bylo použito příliš mnoho nebo příliš málo moči.
- Proveďte test znovu s novou testovací tyčinkou a pečlivě dodržujte pokyny. Můžete odebrat vzorek moči a provést test s použitím metody „Odebraný vzorek“.

9 Co když si nejsem výsledkem jistá?

Viz obrázky v oddílu „Interpretace výsledku“.

Obrázek A: Výsledek je „Nejste těhotná“. Pokud si stále myslíte, že byste mohla být těhotná, viz otázka 4.

Obrázky B-D Váš výsledek je „Jste těhotná“. Vzhled čárky v okénku s výsledkem se může lišit, ale je to stále výsledek „Jste těhotná“, bez ohledu na to, jakbledá nebo tmavá je.

Obrázek B: K tomuto dojde s větší pravděpodobností v případě, že provádíte test před očekávanou menstruací, kdy hladiny hCG mohou být ještě relativně nízké.

Obrázek C: Toto je typické, když provádíte test v den nebo okolo dne očekávané menstruace.

Obrázek D: Toto se s větší pravděpodobností objeví, když provádíte test více než několik dnů po očekávané menstruaci, protože hladiny hCG jsou vyšší.

Pokud si stále nejste jista výsledkem, měla byste počkat nejméně 3 dny, než provedete další test, a pečlivě dodržovat pokyny.

www.clearblue.com

Máte-li dotazy týkající se výrobce, kontaktujte prosím zákaznickou podporu na níže uvedené adrese:

Informace, všeobecné rady ohledně problematiky těhotenství a další kroky naleznete na našich webových stránkách: www.clearblue.com

Pro domácí testování. Určeno pouze pro diagnostické použití *in vitro*.

Není určeno pro vnitřní použití. Nepoužívejte opakovaně.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte při teplotách mezi 2-30 °C.

Pokud byl test skladován v chladu, ponechte jej 30 minut před testováním dosáhnout pokojové teploty.

Prostředek nepoužívejte, jestliže je fóliový obal poškozený.

Nepoužívejte po datu spotřeby. Zlikvidujte s normálním domovním odpadem.

Prostředek nerozobírejte. Obsahuje malé části. Nejezte žádnou součást tohoto prostředku.

Dojde-li k náhodnému požití, vyhledejte lékařskou pomoc.

	Výrobce		Nepoužívejte opakovaně
	Kód šarže		Diagnostický zdravotnický prostředek pro použití <i>in vitro</i>
	Použit do data		Teplotní omezení 2-30 °C

CE
0123



SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ženeva, Švýcarsko.
Clearblue je ochranná známka společnosti SPD. © 2020 SPD. Všechna práva vyhrazena.

☒ Distribuce v ČR: Fidia Pharma CZ s.r.o., K Betání 1092/19,
148 00 Praha 4, Česká republika.